PAT.P TANNER



狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、

使用時は150mmと
3倍に変身!
使いやすく、
普段はじゃまにならない
折りたたみ手すりです。

「サウと壁面の
スペースが広いと、
担心で立ち上がる時
大変楽です。
大変楽です。
大変楽です。

長さ:450mm 耐荷重:100kg

生産物対人賠償責任保険付

# 

天然木を使用 波形グリップ 防菌仕上げ

■例えばこんな場所で活躍します。 トイレを広く使いたいあなたに…

高齢者の方にはトイレに手すりが必要ですよね。 でも、普段は手すりが出っぱっていると、圧迫感がある…… そこで新登場!!

【じゃません!とって】は 普段は**スッキリ**たたんで 使う時は**シッカリ**持てます。

パタン。とたたんで

使用時は便座から立ち上がる際に "ひじ肘" 感覚で体の近くで握って頂けるように設計されています。

また、両側に手すりが欲し い方にも最適です。



【じゃません!とって】は スペースを有効に使いたい 玄関や廊下でも威力を発揮 いたします。





■人にやさしい手すりです。

グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。人にやさしく、 確実ににぎれるグリップデザインで人に優しい手すりです。

■取りつけはとても簡単です。

付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。 (柱の間隔が合わない場合は、補強用の木板を取り付けて下さい)



## 折たたみ手すり **ゞゃません!**




PAT.P




誤って使用しますと、安全を損ない危険です。 注意事項を良く守ってご使用下さい。

### 取り付け前に必ずご確認!

- ●木ネジのきく所(壁に木の下地がある所)を 選んで取り付けて下さい。
- などを使って 手応えのある ところを探し てください。

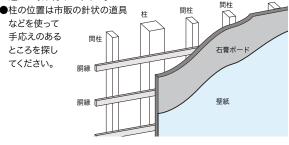

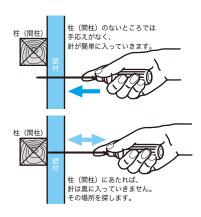


#### 使用上のご注意

- ●必ず正しい取り付け方法によって取り付け下さい。
- ●この製品の制限荷重は100kgです。(但し、静荷重での測定値で保証値では有りません)
- ●木ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
- ●ぶらさがったり、手すりに乗ったりしないでください。
- ●当商品は床面と水平時、上方向への可動は常にフリーになっていますので、上方向に荷重をかけて使用しないでください。
- ●折りたたみの際は、必ず手すりを持って動かして下さい。ブラケットを持って動かすと、指を詰めて怪我をする恐れが有ります。
- ●ストーブ等の高温になるものの近くや、風呂場など水に濡れたり、湿度の高い所、また屋外では使用しないで下さい。
- ●品質を保つために、時々やわらかい布等でカラ拭きして下さい。(水拭きや洗剤・薬品等は使用しないで下さい)
- ●用途以外のご使用は、お避け下さい。

#### 取り付け方

『取り付け前に必ずご確認』をよく読んでから 図を参照にして取り付けて下さい。

- ●木ネジのきく所(上図の間柱や柱部)を選んで、ブラケットの 取り付け位置を決めて下さい。(その時に床面に水平になるようにして下さい。)
- ●取り付け位置(高さ)はご使用される方の身長や体の具合と、 木ネジのきく場所によって決めて下さい。
- ●取り付け位置が決まったら、ブラケットをテープなどで 仮止めし(位置ぶれがなくなります)、 キリや千枚通しなどで軽く穴を開け、 木ネジでしっかりと締付けて下さい。

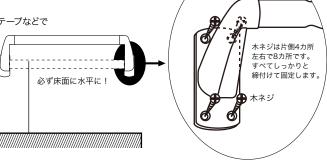




・・・・こんな場合は・・・

壁の間柱の間隔が合わない場合や

取り付けたい場所に間柱な無い場合は、 "補強板"を付けましょう。

補強板

コンクリート壁に取り付ける場合は ドリルで下穴を開けましょう。

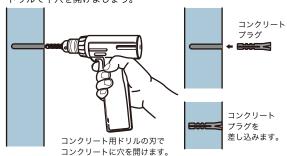

発売元

#### TANNER

胴縁

#### 株式会社田邊金属工業所

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南2丁目13番28号 TEL.06-6302-3681(代) FAX.06-6302-3685 http://www.tanner-wago.co.jp

手すり:天然木

ブラケット:亜鉛ダイキャスト

カバー板:ABS樹脂 フィルム:PET

■同梱部品内容

手すり本体……1本 受座固定ネジ……8本 (SUS304 M4×38) コンクリートプラグ…8本

(7mm用)